

# 取扱説明書

RadiForce®  
GX530-BL  
GX530-CL  
GX530-CLAR

モノクロ液晶モニター

## 重要

ご使用前には必ず使用上の注意、この取扱説明書およびセットアップマニュアルをよくお読みになり、正しくお使いください。

- コンピュータとの接続から使いはじめるまでの基本説明についてはセットアップマニュアルをお読みください。
- 最新の取扱説明書は、当社のWebサイトからダウンロードできます。  
<http://www.eizo.co.jp>



製品の仕様は販売地域により異なります。お買い求めの地域に合った言語の取扱説明書をご確認ください。

---

Copyright © 2011-2013 EIZO株式会社 All rights reserved.

- 1.本書の著作権はEIZO株式会社に帰属します。本書の一部あるいは全部をEIZO株式会社からの事前の許諾を得ることなく転載することは固くお断りします。
  - 2.本書の内容について、将来予告なしに変更することがあります。
  - 3.本書の内容については、万全を期して作成しましたが、万一誤り、記載もれなどお気づきの点がありましたら、ご連絡ください。
  - 4.本機の使用を理由とする損害、逸失利益などの請求につきましては、上記にかかわらず、いかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
-

# モニターについて

---

この製品は、MRIやCT、デジタルマンモグラフィなどの医用画像表示用途に適しています。

---

この製品は、日本国内専用品です。日本国外での使用に関して、当社は一切責任を負いかねます。  
This product is designed for use in Japan only and cannot be used in any other countries.

---

本書に記載されている用途以外での使用は、保証外となる場合があります。

---

本書に定められている仕様は、付属の電源コードおよび当社が指定する信号ケーブル使用時にのみ適用いたします。

---

この製品には、当社オプション品または当社が指定する製品をお使いください。

---

製品内部の電気部品の動作が安定するのに、約30分かかりますので、モニターの調整は電源を入れたあと、または省電力モードから復帰して30分以上経過してからおこなってください。

---

画面の品質が安定するのに、数分かかりますので、モニターの電源を入れたあと、または省電力モードから復帰して数分以上経過してから読影をおこなってください。

---

経年使用による輝度変化を抑え、安定した輝度を保つためには、ブライトネスを下げて使用されることをお勧めします。

---

同じ画像を長時間表示することによって、表示を変えたときに前の画像が残像として見えることがあります。長時間同じ画像を表示するようなときには、コンピュータのスクリーンセーバーまたはパワーセーブ機能を使用してください。

---

この製品を美しく保ち、長くお使いいただくためにも定期的にクリーニングをおこなうことをお勧めします（「[クリーニングの仕方](#)」（P.4）参照）。

---

画面上に欠点、発光している少数のドットが見られることがありますが、液晶パネルの特性によるもので、製品本体の欠陥ではありません。

---

液晶パネルに使用されるバックライトには寿命があります。画面が暗くなったり、ちらついたり、点灯しなくなったときには、販売店またはEIZOサポートにお問い合わせください。

---

パネル面やパネルの外枠は強く押さないでください。強く押すと、干渉縞が発生するなど表示異常を起こすことがありますので取り扱いにご注意ください。また、パネル面に圧力を加えたままにしておきますと、液晶の劣化や、パネルの破損などにつながる恐れがあります。（液晶パネルを押した跡が残った場合、画面全体に白い画像または黒い画像を表示すると解消されることがあります。）

---

パネルを固い物や先のとがった物などで押したり、こすったりしないようにしてください。傷が付く恐れがあります。なお、ティッシュペーパーなどで強くこすっても傷が入りますのでご注意ください。

---

この製品を冷え切った状態のまま室内に持ち込んだり、急に室温を上げたりすると、製品の表面や内部に露が生じることがあります（結露）。結露が生じた場合は、結露がなくなるまで製品の電源を入れずにお待ちください。そのまま使用すると故障の原因となることがあります。

---

## クリーニングの仕方

---

### 注意点

- アルコール、消毒薬などの薬品は、キャビネットやパネル面の光沢の変化、変色、色あせ、画質の劣化などにつながる恐れがあります。
- シンナー、ベンジン、ワックス、研磨クリーナは、キャビネットやパネル面をいためるため絶対に使用しないでください。

### 参考

- キャビネットやパネル面のクリーニングにはScreenCleaner（オプション品）をご利用いただくことをお勧めします。（GX530-CLARには付属しています。）

キャビネットやパネル面の汚れは、やわらかい布に少量の水をしめらせてやさしくふき取ってください。

## モニターを快適にご使用いただくために

---

- 画面が暗すぎたり、明るすぎたりすると目に悪影響をおよぼすことがあります。状況に応じてモニター画面の明るさを調整してください。
- 長時間モニター画面を見続けると目が疲れますので、1 時間に約 10 分の休憩を取ってください。

# 目次

表紙 .....	1	3-9. DC5V出力の有効/無効を設定する .....	17
モニターについて .....	3	3-10. 初期設定に戻す .....	17
クリーニングの仕方 .....	4	● ブライトネス調整値をリセットする .....	17
モニターを快適にご使用いただくために .....	4	● すべての設定内容をリセットする .....	17
目次 .....	5	第4章 モニターの品質管理をする .....	18
第1章 はじめに .....	7	4-1. キャリブレーションを実行する .....	18
1-1. 特長 .....	7	● SelfCalibrationを実行する .....	18
1-2. EIZO LCDユーティリティディスクについて .....	8	● SelfCalibrationの結果を閲覧する .....	18
● ディスクの内容と概要 .....	8	4-2. 階調をチェックする .....	19
● RadiCS LE/ScreenManager Pro for Medicalを使用するときは .....	8	● 階調チェックを実行する .....	19
1-3. 基本操作と機能一覧 .....	9	● 階調チェックの結果を閲覧する .....	19
● 調整メニューの基本操作方法 .....	9	4-3. 警告表示、QC履歴表示のオン/オフを設定する .....	19
● 機能一覧 .....	10	第5章 省電力機能について .....	20
第2章 画面を調整する .....	11	5-1. パワーセーブの設定をする .....	20
2-1. 対応解像度 .....	11	5-2. 電源ランプの表示を設定する .....	20
2-2. 解像度を設定する .....	11	5-3. 離席時に省電力モードの設定をする .....	21
● Windows 8 / Windows 7の場合 .....	11	第6章 こんなときは .....	22
● Windows Vistaの場合 .....	11	6-1. 画面が表示されない場合 .....	22
● Windows XPの場合 .....	11	6-2. 画面に関する症状 .....	23
● Mac OS Xの場合 .....	11	6-3. その他の症状 .....	23
2-3. 表示モード（CAL Switchモード）を選択する .....	12	● エラーコード表 .....	24
2-4. ブライトネス（明るさ）を調整する .....	12	第7章 ご参考に .....	25
第3章 モニターの設定をする .....	13	7-1. オプションアーム取付方法 .....	25
3-1. 設置方向を設定する .....	13	7-2. 複数のコンピュータを接続する .....	26
3-2. 入力信号の設定をする .....	14	● 入力信号を切り替える .....	26
● DVI接続する .....	14	● 入力信号の切替方法を設定する .....	27
● DisplayPort接続する .....	14	7-3. USB（Universal Serial Bus）の活用について .....	28
3-3. モード選択の有効/無効を設定する .....	15	● 必要なシステム環境 .....	28
3-4. 表示言語を設定する .....	15	● 接続方法（USB機能のセットアップ方法） .....	28
3-5. 調整メニューの位置を変更する .....	15	7-4. モニター情報を表示する .....	29
3-6. EIZOロゴ表示を設定する .....	16	● 信号情報を表示する .....	29
3-7. 操作ボタンをロックする .....	16	● モニター情報を表示する .....	29
3-8. DDC通信の有効/無効を設定する .....	16	7-5. 仕様 .....	30
		7-6. 用語集 .....	33
		付録 .....	34

商標 .....	34
ライセンス .....	34
VCCI .....	35
医療規格 .....	35
その他規格 .....	35
中国RoHS .....	36
製品回収、リサイクルシステムについて .....	37

# 第1章 はじめに

このたびは当社モノクロ液晶モニターをお買い求めいただき、誠にありがとうございます。

## 1-1. 特長

- ・ 21.3 型
- ・ 解像度 5M ピクセル（縦表示 2048 × 2560 ドット（H×V））対応
- ・ 15 メガサブピクセル表示  
サブピクセルを独立して制御するSub-Pixel Drive（SPD）機能により超高解像度2048×7680ドットの表示が可能です。15メガサブピクセル（15MsP）、1,500万画素の表示によって、元画像をよりきめ細かく再現し、輪郭を鮮明に抽出します。  
※15MsP表示に対応したソフトウェアが必要です。  
※15MsP表示時は最大10bit同時表示に対応します。
- ・ 高コントラスト比（1200：1）のパネルを採用  
メリハリのある画像表示を実現します。
- ・ DisplayPort 対応（8bit または 10bit に対応、音声は非対応）
- ・ Integrated Front Sensor を内蔵し、モニター単独でのキャリブレーションおよび階調チェックが可能な RadiCS SelfQC 機能搭載  
「第4章 モニターの品質管理をする」（P.18）参照
- ・ キャリブレーション、履歴の管理が可能な品質管理ソフトウェア「RadiCS LE（Windows 用）」を添付  
「1-2. EIZO LCDユーティリティディスクについて」（P.8）参照
- ・ マウスやキーボードを使って画面を調整するソフトウェア「ScreenManager Pro for Medical」添付  
「1-2. EIZO LCDユーティリティディスクについて」（P.8）参照
- ・ 最適なキャリブレーションモードを選択できる CAL Switch（キャルスイッチ）機能搭載  
「2-3. 表示モード（CAL Switchモード）を選択する」（P.12）参照
- ・ DICOM（P.33）Part 14 に準拠した画面選択が可能
- ・ フレーム同期モード対応周波数：24.5 ～ 25.5 Hz、49 ～ 51 Hz
- ・ 省電力機能  
この製品は省電力のための機能を搭載しています。
  - 主電源オフ時消費電力0W  
主電源スイッチを装備。  
モニターを使用しない時は、主電源スイッチを切ることで、確実に電源供給が停止します。
  - 人感センサー機能  
モニター正面のセンサーが人の動きを検知します。人がモニターから離れると、自動的に省電力モードに移行して画面を非表示にするため、消費電力の低減につながります。  
「5-3. 離席時に省電力モードの設定をする」（P.21）参照
- ・ 照度センサー内蔵  
環境によっては、照度計と異なる測定値を示す場合があります。  
センサーは、品質管理ソフトウェア「RadiCS/RadiCS LE」で使用します。測定は、ユーザーがメニューを操作することで実行できます。  
測定値や測定方法の詳細は、RadiCS/RadiCS LE取扱説明書（CD-ROM内）を参照してください。
- ・ 著作権保護技術 HDCP 対応（DisplayPort のみ）

### 注意点

- ・ 内蔵センサーの測定精度に影響がでる場合がありますので、温度30℃以下および湿度70%以下の環境での保管、使用をお勧めします。また、直射日光下での保管、使用を避けてください。

## 1 - 2. EIZO LCDユーティリティディスクについて

この製品には「EIZO LCDユーティリティディスク」（CD-ROM）が付属しています。ディスクの内容やソフトウェアの概要は次のとおりです。

### ● ディスクの内容と概要

ディスクには、調整用のソフトウェア、取扱説明書が含まれています。各項目の起動方法や参照方法はディスク内のReadmeja.txtを参照してください。

内容	概要
Readmeja.txtファイル	
RadiCS LE（Windows用）	キャリブレーションをおこない、履歴管理が可能な品質管理ソフトウェアです。
ScreenManager Pro for Medical（Windows用）	マウスやキーボードを使って画面を調整するソフトウェアです。
モニターの取扱説明書（PDFファイル）	

### ● RadiCS LE/ScreenManager Pro for Medicalを使用するときは

RadiCS LE/ScreenManager Pro for Medicalのインストール方法、使用方法については、ディスク内のそれぞれの取扱説明書を参照してください。

ソフトウェアを使用する場合は、モニターとコンピュータを付属のUSBケーブルで接続してください。詳細は、「[7 - 3. USB（Universal Serial Bus）の活用について](#)」（P.28）を参照してください。




## 1 - 3. 基本操作と機能一覧

### ● 調整メニューの基本操作方法


#### 1. 調整メニューの表示

1. ENTER を押し、調整メニューを表示します。

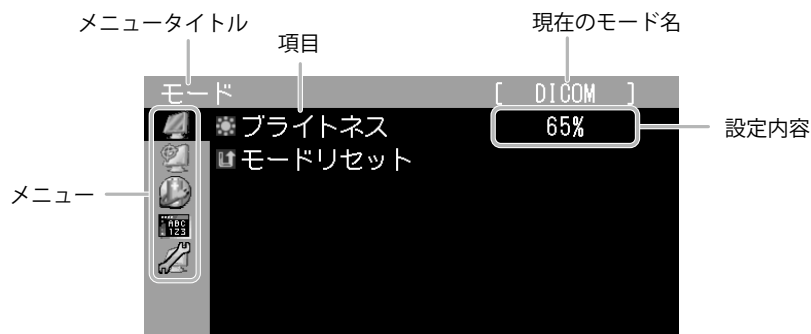


#### 2. 調整/設定


1. ▲▼ で、調整/設定したいメニューを選択し、ENTER を押します。

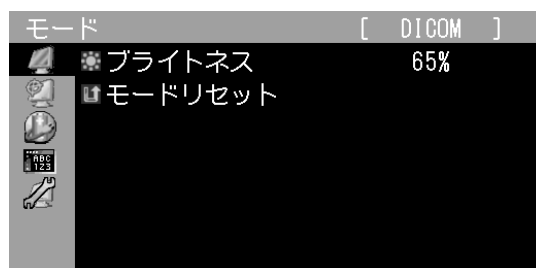

2. ▲▼ で、調整/設定したい項目を選択し、ENTER を押します。

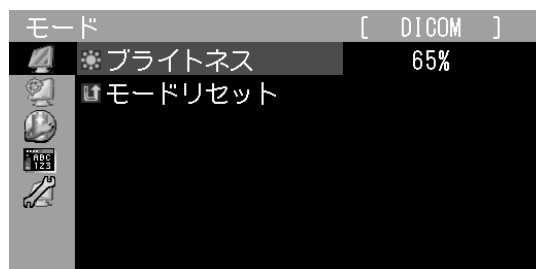

3. ▲▼ で、調整/設定し、ENTER を押して確定します。

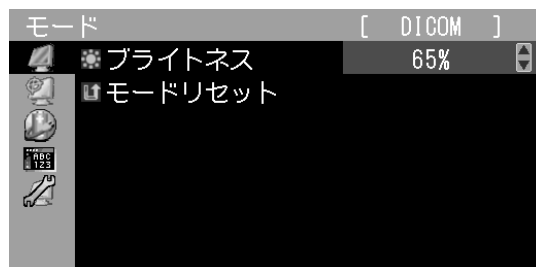










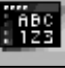











#### 3. 終了

1. RETURN を数回押すと、メニューを終了します。

## ● 機能一覧

調整メニューの調整および設定項目一覧表です。

メインメニュー	項目	参照先
モード 	 ブライツネス	「2-4. ブライツネス（明るさ）を調整する」 (P.12)
	 モードリセット	「3-10. 初期設定に戻す」 (P.17)
RadiCS SelfQC 	 SelfCalibration	「4-1. キャリブレーションを実行する」 (P.18)
	 階調チェック	「4-2. 階調をチェックする」 (P.19)
	 設定	「4-3. 警告表示、QC履歴表示のオン/オフを設定する」 (P.19)
Power Manager 	 パワーセーブ	「5-1. パワーセーブの設定をする」 (P.20)
	 人感センサー	「5-3. 離席時に省電力モードの設定をする」 (P.21)
	 電源ランプ	「5-2. 電源ランプの表示を設定する」 (P.20)
メニュー設定 	 言語選択	「3-4. 表示言語を設定する」 (P.15)
	 メニューポジション	「3-5. 調整メニューの位置を変更する」 (P.15)
ツール 	 入力	「入力信号を切り替える」 (P.26)
	 入力切替	「入力信号の切替方法を設定する」 (P.27)
	 モード設定	「3-3. モード選択の有効/無効を設定する」 (P.15)
	 入力信号情報	「7-4. モニター情報を表示する」 (P.29)
	 モニター情報	
	 オールリセット	「3-10. 初期設定に戻す」 (P.17)

## 第2章 画面を調整する

### 2-1. 対応解像度

この製品の対応解像度については、セットアップマニュアル「表示解像度について」を参照してください。

### 2-2. 解像度を設定する

モニターをコンピュータに接続したときに適切な解像度で表示されない場合、または解像度を変更したい場合は、次の手順で解像度を変更します。

#### ● Windows 8 / Windows 7の場合

1. Windows 8の場合、スタート画面から「デスクトップ」のタイルをクリックして、デスクトップを表示します。
2. デスクトップ上のアイコンがない場所で、マウスの右ボタンをクリックします。
3. 表示されるメニューから「画面の解像度」をクリックします。
4. 「画面の解像度」ダイアログボックスで、モニターを選択します。
5. 「解像度」をクリックして変更したい解像度を選択します。
6. 選択したら、「OK」ボタンをクリックします。
7. 確認のダイアログボックスが表示されるので、「変更を維持する」ボタンをクリックします。

#### ● Windows Vistaの場合

1. デスクトップ上のアイコンがない場所で、マウスの右ボタンをクリックします。
2. 表示されるメニューから「個人設定」をクリックします。
3. 「個人設定」ウィンドウで「画面の設定」をクリックします。
4. 「画面の設定」ダイアログボックスで「モニタ」タブを選択し、「解像度」の欄から変更したい解像度を選択します。
5. 選択したら、「OK」ボタンをクリックします。
6. 確認のダイアログボックスが表示されるので、「はい」ボタンをクリックします。

#### ● Windows XPの場合

1. デスクトップ上のアイコンがない場所で、マウスの右ボタンをクリックします。
2. 表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。
3. 「画面のプロパティ」ダイアログボックスが表示されるので、「設定」タブをクリックし、「ディスプレイ」の「画面の解像度」で解像度を選択します。
4. 選択したら、「OK」ボタンをクリックして、ダイアログボックスを閉じます。

#### ● Mac OS Xの場合


1. アップルメニューの「システム環境設定」をクリックします。
2. 「システム環境設定」ダイアログボックスが表示されるので、「ハードウェア」欄の「ディスプレイ」をクリックします。
3. 表示されたダイアログボックスで「ディスプレイ」タブを選択し、「解像度」の欄から変更したい解像度を選択します。
4. 選択したらすぐに画面が変更されるので、適切な解像度に設定したらウィンドウを閉じます。

## 2-3. 表示モード（CAL Switchモード）を選択する

モニターの用途に応じた表示モードに簡単に切り替えることができます。

### モードの種類

モード	目的
1-DICOM	DICOMで表示したい場合に選択します。
2-Custom	好みに応じた設定をおこなう際に選択します。
3-CAL	キャリブレーションソフトウェアによる調整状態で表示します。

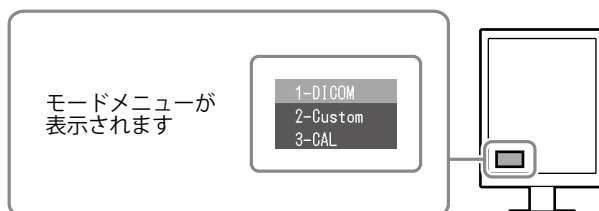

### 設定方法

1. MODE を押します。  
モードメニューが画面左下に表示されます。
2. MODE を押すたびにモードが順に切り替わり表示されます。  
モードメニュー表示中は、▲または▼を押してモードを切り替えることもできます。

→1-DICOM←→2-Custom←→3-CAL←

### 参考

- 調整メニューとモード名を同時に表示させることはできません。

## 2-4. ブライツネス（明るさ）を調整する

バックライト（液晶パネル背面の光源）の明るさを変化させて、画面の明るさを調整します。

### 設定範囲

0～100%

### 設定方法

1. 調整メニューの「モード」を選択し、ENTER を押します。
2. 「モード」で「ブライツネス」を選択し、ENTER を押します。
3. ▲または▼で設定します。
4. 設定が完了したら ENTER を押します。

## 第3章 モニターの設定をする

### 3-1. 設置方向を設定する




ご使用の環境にあわせて画像の表示方向を変更することができます。

#### 注意点

- ・グラフィックスボードの取扱説明書を参照してください。
- ・コンピュータが起動していなくても設定することができます。

#### 設定方法

1. **⏻**を押して、モニターの電源を切ります。
2. **MODE**を押しながら **⏻**を2秒以上押してモニターの電源を入れます。  
「オプション設定」メニューが表示されます。
3. 「オプション設定」より「設置方向」を選択し、**ENTER**を押します。
4. **▲**または**▼**で「横置き」/「縦置き(SW)」/「縦置き(HW)」のいずれかを選択し、**ENTER**を押します。

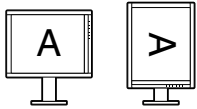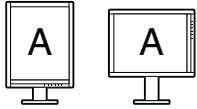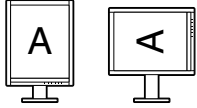モニター設置方向	表示例
横置き 横型設置時に選択します。	
縦置き(SW) 縦型設置時に選択します。グラフィックスボードのユーティリティソフトを使用して表示画像を90°回転させます。	
縦置き(HW) 縦型設置時に選択します。モニターの機能を使用して表示画像を90°回転させます。	

5. **▲**または**▼**で「完了」を選択します。
6. **ENTER**を押します。  
「オプション設定」メニューが閉じます。

## 3 - 2. 入力信号の設定をする

ご使用の環境に応じた信号を選択することができます。

### 注意点

- 表示する場合には、対応のグラフィックスボードが必要です。
- グラフィックスボードの取扱説明書を参照してください。

### ● DVI接続する

#### 設定方法

1. ❶を押して、モニターの電源を切ります。
2. MODEを押しながら❶を2秒以上押してモニターの電源を入れます。  
「オプション設定」メニューが表示されます。
3. 「オプション設定」より「信号選択」を選択し、ENTERを押します。
4. ▲または▼で「DVI」を選択し、ENTERを押します。
5. ▲または▼で「信号フォーマット」を選択し、ENTERを押します。
6. ▲または▼で「Standard」または「SDG 8」のいずれかを選択し、ENTERを押します。
7. ▲または▼で「Sub Pixel Drive」を選択し、ENTERを押します。
8. ▲または▼で「オン」または「オフ」を選択し、ENTERを押します。
9. RETURNを2回押します。
10. ▲または▼で「完了」を選択します。
11. ENTERを押します。  
「オプション設定」メニューが閉じます。

### ● DisplayPort接続する

#### 設定方法

1. ❶を押して、モニターの電源を切ります。
2. MODEを押しながら❶を2秒以上押してモニターの電源を入れます。  
「オプション設定」メニューが表示されます。
3. 「オプション設定」より「信号選択」を選択し、ENTERを押します。
4. ▲または▼で「DisplayPort」を選択し、ENTERを押します。
5. ▲または▼で「Sub Pixel Drive」を選択し、ENTERを押します。
6. ▲または▼で「オン」または「オフ」を選択し、ENTERを押します。
7. RETURNを2回押します。
8. ▲または▼で「完了」を選択します。
9. ENTERを押します。  
「オプション設定」メニューが閉じます。

### 3-3. モード選択の有効/無効を設定する

モードを選択するときに、設定したモードだけを選択することができます。  
表示するモードが限定されている場合や、表示状態をむやみに変更したくない場合にご利用ください。

#### 設定方法

1. 調整メニューの「ツール」を選択し、ENTERを押します。
2. 「ツール」で「モード設定」を選択し、ENTERを押します。
3. ▲または▼で設定を変更するモードを選択し、ENTERを押します。
4. ▲または▼で「オン」または「オフ」を選択します。
5. 設定が完了したらENTERを押します。

#### 注意点

- ・すべてのモードを無効にすることはできません。1つ以上のモードを「オン」に設定してください。

### 3-4. 表示言語を設定する

調整メニューやメッセージの表示言語が選択できます。

#### 選択できる言語

英語/ドイツ語/フランス語/スペイン語/イタリア語/スウェーデン語/日本語/中国語（簡体）/中国語（繁体）

#### 設定方法

1. 調整メニューの「メニュー設定」を選択し、ENTERを押します。
2. 「メニュー設定」で「言語選択」を選択し、ENTERを押します。
3. ▲または▼で言語を選択します。
4. 設定が完了したらENTERを押します。

### 3-5. 調整メニューの位置を変更する

調整メニューの表示位置を移動できます。

#### 設定方法

1. 調整メニューの「メニュー設定」を選択し、ENTERを押します。
2. 「メニュー設定」で「メニューポジション」を選択し、ENTERを押します。
3. ▲または▼で位置を選択します。
4. 設定が完了したらENTERを押します。

## 3 - 6. EIZOロゴ表示を設定する

EIZOロゴの表示/非表示の切り替えができます。

### 設定方法

1. ❶を押して、モニターの電源を切ります。
2. MODEを押しながら❶を2秒以上押してモニターの電源を入れます。  
「オプション設定」メニューが表示されます。
3. 「オプション設定」より「起動ロゴ」を選択し、ENTERを押します。
4. ▲または▼で「オン」または「オフ」を選択し、ENTERを押します。
5. ▲または▼で「完了」を選択します。
6. ENTERを押します。  
「オプション設定」メニューが閉じます。

## 3 - 7. 操作ボタンをロックする

調整/設定した状態を変更できないようにします。

### 設定方法

1. ❶を押して、モニターの電源を切ります。
2. MODEを押しながら❶を2秒以上押してモニターの電源を入れます。  
「オプション設定」メニューが表示されます。
3. 「オプション設定」より「操作ロック」を選択し、ENTERを押します。
4. ▲または▼で「オフ」/「メニュー」/「オール」のいずれかを選択し、ENTERを押します。

設定項目	ロックできるボタン
オフ (初期設定)	なし (すべてのボタンが有効)
メニュー	ENTER ボタン
オール	❶ ボタンを除くすべてのボタン

5. ▲または▼で「完了」を選択します。
6. ENTERを押します。  
「オプション設定」メニューが閉じます。

## 3 - 8. DDC通信の有効/無効を設定する

DDC通信の有効/無効を切り替えます。通常はオンでご使用ください。(DDC/CI通信とは異なります。)

### 設定方法

1. ❶を押して、モニターの電源を切ります。
2. MODEを押しながら❶を2秒以上押してモニターの電源を入れます。  
「オプション設定」メニューが表示されます。
3. 「オプション設定」より「DDC」を選択し、ENTERを押します。
4. ▲または▼で「オン」または「オフ」を選択し、ENTERを押します。
5. ▲または▼で「完了」を選択します。
6. ENTERを押します。  
「オプション設定」メニューが閉じます。



## 3 - 9. DC5V出力の有効/無効を設定する

DC5V出力の有効/無効を切り替えます。通常はオフでご使用ください。

### 設定方法

1. **⏻**を押して、モニターの電源を切ります。
2. **MODE**を押しながら **⏻**を2秒以上押してモニターの電源を入れます。  
「オプション設定」メニューが表示されます。
3. 「オプション設定」より「DC5V Output」を選択し、**ENTER**を押します。
4. **▲**または**▼**で「オン」または「オフ」を選択し、**ENTER**を押します。
5. **▲**または**▼**で「完了」を選択します。
6. **ENTER**を押します。  
「オプション設定」メニューが閉じます。

## 3 - 10. 初期設定に戻す

リセットには、ブライトネス調整のみを初期設定に戻すモードリセットと、すべての設定内容を初期設定に戻すオールリセットの2種類があります。

### 注意点

- ・リセット実行後は、リセット前の状態に戻すことはできません。

### 参考

- ・初期値については、「[主な初期設定値](#)」(P.31)を参照してください。

### ● ブライトネス調整値をリセットする

現在選択しているモードのブライトネス調整値のみを初期設定に戻します。

#### 設定方法

1. 調整メニューの「モード」を選択し、**ENTER**を押します。
2. 「モード」で「モードリセット」を選択し、**ENTER**を押します。
3. **▲**または**▼**で「実行」を選択します。
4. **ENTER**を押します。  
ブライトネス調整値が初期設定になります。

### ● すべての設定内容をリセットする

すべての設定内容を初期設定に戻します（「入力」、「オプション設定」メニューは除く）。

#### 設定方法

1. 調整メニューの「ツール」を選択し、**ENTER**を押します。
2. 「ツール」で「オールリセット」を選択し、**ENTER**を押します。
3. **▲**または**▼**で「実行」を選択します。
4. **ENTER**を押します。  
「入力」および「オプション設定」メニューを除くすべての設定内容が初期設定になります。

## 第4章 モニターの品質管理をする

この製品は、Integrated Front Sensorを内蔵しており、キャリブレーションや階調チェックをモニター単独で定期的に行うことができます。

### 参考

- ・医療規格に対応した高度な品質管理をおこないたい場合には、別売のモニター品質管理ソフトウェアキット「RadiCS UX1」を使用してください。
- ・Integrated Front Sensorの測定結果を基準としたいUX1センサーの測定結果にあわせたい場合は、RadiCS/RadiCS LEを使用してコレレーションを実行してください。定期的なコレレーションにより、IntegratedFrontSensorはUX1と同等の測定精度を維持することができます。詳細は、RadiCS/RadiCS LE取扱説明書を参照してください。
- ・モニターの設置方向を変更した場合は、必ずコレレーションを実行してください。
- ・キャリブレーションの調整目標および階調チェックの判定値、スケジュールは、「RadiCS」で設定できます。
- ・キャリブレーションの調整目標、スケジュールは、付属のソフトウェア「RadiCS LE」でも設定できます。詳細は、「RadiCS LE取扱説明書」（CD-ROM内）を参照してください。

### 4-1. キャリブレーションを実行する

SelfCalibrationを実行し、最新の結果を閲覧できます。また、RadiCS/RadiCS LEでスケジュールを設定した場合には、次回の実行スケジュールを表示します。

#### ● SelfCalibrationを実行する

##### 設定方法

1. 調整メニューの「RadiCS SelfQC」を選択し、ENTERを押します。
2. 「RadiCS SelfQC」で「SelfCalibration」を選択し、ENTERを押します。
3. ▲または▼で「実行」を選択します。
4. 設定が完了したらENTERを押します。

SelfCalibrationが実行されます。

##### 注意点

- ・SelfCalibration実行後は、実際の使用環境温度で階調チェックを実行してください。

#### ● SelfCalibrationの結果を閲覧する

##### 注意点

- ・「QC履歴表示」を「オン」に設定した場合に閲覧できます（「4-3. 警告表示、QC履歴表示のオン/オフを設定する」（P.19）参照）。

##### 設定方法

1. 調整メニューの「RadiCS SelfQC」を選択し、ENTERを押します。
2. 「RadiCS SelfQC」で「SelfCalibration」を選択し、ENTERを押します。
3. ▲または▼で「結果閲覧」を選択します。
4. ▲または▼で「DICOM」/「Custom」/「CAL」のいずれかを選択します。
5. 設定が完了したらENTERを押します。

SelfCalibrationの結果（最大エラー率、前回実行日、エラーコードなど）が表示されます。

## 4-2. 階調をチェックする

階調チェックを実行し、最新の結果を閲覧できます。また、RadiCSでスケジュールを設定した場合には、次回の実行スケジュールを表示します。

### ● 階調チェックを実行する

#### 注意点

- ・ 実際の使用環境温度で階調チェックを実行してください。

#### 設定方法

1. 調整メニューの「RadiCS SelfQC」を選択し、ENTERを押します。
2. 「RadiCS SelfQC」で「階調チェック」を選択し、ENTERを押します。
3. ▲または▼で「実行」を選択します。
4. 設定が完了したらENTERを押します。  
階調チェックが実行されます。

### ● 階調チェックの結果を閲覧する

#### 注意点

- ・ 「QC履歴表示」を「オン」に設定した場合に閲覧できます。

#### 設定方法

1. 調整メニューの「RadiCS SelfQC」を選択し、ENTERを押します。
2. 「RadiCS SelfQC」で「階調チェック」を選択し、ENTERを押します。
3. ▲または▼で「結果閲覧」を選択します。
4. ▲または▼で「DICOM」/「Custom」/「CAL」のいずれかを選択します。
5. 設定が完了したらENTERを押します。  
過去5回までの階調チェックの結果（Passed/Failed/Canceled/ERR）が表示されます。

## 4-3. 警告表示、QC履歴表示のオン/オフを設定する

階調チェックの結果がNGだった場合の警告表示、QC履歴表示のオン/オフを設定することができます。

#### 設定方法

1. 調整メニューの「RadiCS SelfQC」を選択し、ENTERを押します。
2. 「RadiCS SelfQC」で「設定」を選択し、ENTERを押します。
3. ▲または▼で「警告表示」または「QC履歴表示」を選択します。
4. ▲または▼で「オン」または「オフ」を選択します。
5. 設定が完了したらENTERを押します。

## 第5章 省電力機能について

### 5-1. パワーセーブの設定をする

コンピュータの状態と連動してモニターを省電力モードにする/しないの切り替えができます。省電力モードに移行すると画面を非表示にします。

#### 注意点

- ・主電源を切るか、電源プラグを抜くことで、確実にモニター本体への電源供給は停止します。
- ・モニターが省電力モードの場合、またモニターの電源ボタンで電源を切っても、USBアップストリームポートおよびUSBダウンストリームポートに接続されている機器が動作します。そのためモニターの消費電力は、省電力モードであっても接続される機器によって変化します。
- ・パワーセーブ移行の5秒前になると予告メッセージが表示されます。

#### 設定方法

1. 調整メニューの「PowerManager」を選択し、ENTERを押します。
2. 「PowerManager」で「パワーセーブ」を選択し、ENTERを押します。
3. ▲または▼で「オフ」または「高」/「低」のいずれかを選択します。

設定	機能
高	バックライトを消します。最も省電力効果が高くなります。
低	バックライト最小点灯状態にします。次回、パワーセーブから復帰した後、動作が安定するまでの時間を短くすることができます。

4. 設定が完了したら ENTER を押します。

#### 省電力の流れ

##### DVI信号入力時

「DVI DMPM」に準拠しています。

##### DisplayPort信号入力時

「DisplayPort Standard V1.1a」に準拠しています。

コンピュータの設定に連動し5秒後に省電力モードに入ります。

コンピュータの状態	モニターの状態	電源ランプ
オン	オペレーションモード	緑
省電力モード	省電力モード	橙

### 5-2. 電源ランプの表示を設定する

画面表示時の電源ランプ（緑）の輝度を設定することができます（初期設定では、電源ランプは電源を入れたときに点灯し、4に設定されています）。

#### 設定方法

1. 調整メニューの「PowerManager」を選択し、ENTERを押します。
2. 「PowerManager」で「電源ランプ」を選択し、ENTERを押します。
3. ▲または▼で電源ランプの明るさを「オフ」または1～7の範囲から好みに応じて選択します。
4. 設定が完了したら ENTER を押します。

## 5 - 3. 離席時に省電力モードの設定をする

人感センサーを「レベル-1」～「レベル-4」に設定すると、モニター正面のセンサーが人の動きを検知します。人がモニターから離れると、モニターは自動的に省電力モードに移行し、画面を非表示にして消費電力を低減します。再度人が近づくと、省電力モードから復帰して画面を表示します。人感センサーの検知レベルは、ご使用の環境にあわせて変更することができます。

### 参考

- ・省電力モードへの移行時には、移行をお知らせするメッセージが表示されます。

### 注意点

- ・横置き設置時、または「RadiCS SelfQC」実行時には使用できません。

### 設定方法

1. 調整メニューの「PowerManager」を選択し、ENTERを押します。
2. 「PowerManager」で「人感センサー」を選択し、ENTERを押します。
3. ▲または▼で「オフ」または「レベル-1」/「レベル-2」/「レベル-3」/「レベル-4」（センサーの検知レベル）のいずれかを選択します。



検知レベル	検知範囲	詳細
レベル-1	90 cm以下	検知範囲から離れると、省電力モードに移行します。検知範囲に静止物がある場合、人がいるものと判断します。離席していないにもかかわらず省電力モードに移行することが多い場合、この設定に変更することをお勧めします。
レベル-2	70 cm以下	
レベル-3	自動設定（90 cm以下）	人の動きに合わせて検知範囲を設定します。設定された範囲から離れると、省電力モードに移行します。検知範囲に静止物がある場合でも移行します。
レベル-4	自動設定（70 cm以下）	

4. 設定が完了したら ENTER を押します。

## 第6章 こんなときは

症状に対する処置をおこなっても解消されない場合は、販売店またはEIZOサポートにご相談ください。

### 6-1. 画面が表示されない場合

症状	原因と対処方法
<b>1. 画面が表示されない</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>電源ランプが点灯しない</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>電源コードは正しく接続されていますか。</li> <li>主電源を入れてください。</li> <li>⏻を押してください。</li> <li>主電源を切り、数分後にもう一度電源を入れてみてください。</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>電源ランプが点灯：橙色、緑色</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>入力信号を切り替えてみてください（「<a href="#">入力信号を切り替える</a>」（P.26）参照）。</li> <li>マウス、キーボードを操作してみてください。</li> <li>コンピュータの電源は入っていますか。</li> <li>人感センサーを「レベル-1」～「レベル-4」に設定している場合、省電力モードに移行している可能性があります。モニターに近づいてみてください。</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>電源ランプが点滅：橙色、緑色</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DisplayPort接続している機器に問題があります。問題を解決し、モニターの電源を入れなおしてみてください。詳細はDisplayPort接続している機器の取扱説明書を参照してください。</li> </ul>
<b>2. 次のようなメッセージが表示される</b>	この表示はモニターが正常に機能していても、信号が正しく入力されないときに表示されます。
<ul style="list-style-type: none"> <li>信号が入力されていない場合の表示です。 例：</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>コンピュータによっては電源を入れても信号がすぐに出力されないため、左のような画面が表示されることがあります。</li> <li>コンピュータの電源は入っていますか。</li> <li>信号ケーブルは正しく接続されていますか。</li> <li>入力信号を切り替えてみてください（「<a href="#">入力信号を切り替える</a>」（P.26）参照）。</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>入力されている信号が周波数仕様範囲外であることを示す表示です。 例：</li> </ul>  <p>fD：ドットクロック fH：水平走査周波数 fV：垂直走査周波数</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>コンピュータの設定が、この製品で表示できる解像度、垂直走査周波数になっていますか（セットアップマニュアル「表示解像度について」参照）。</li> <li>コンピュータを再起動してみてください。</li> <li>グラフィックスボードのユーティリティなどで、適切な表示モードに変更してください。詳細はグラフィックスボードの取扱説明書を参照してください。</li> </ul>

## 6-2. 画面に関する症状

症状	原因と対処方法
1. 画面が明るすぎる/暗すぎる	<ul style="list-style-type: none"><li>調整メニューの「ブライトネス」を調整してください。 (液晶モニターのバックライトには、寿命があります。画面が暗くなったり、ちらついたりするようになったら、EIZOサポートにご相談ください。)</li></ul>
2. 文字がぼやけて見える	<ul style="list-style-type: none"><li>コンピュータの設定が、この製品で表示できる解像度、垂直走査周波数になっていますか（セットアップマニュアル「表示解像度について」参照）。</li></ul>
3. 残像が現れる	<ul style="list-style-type: none"><li>この現象は液晶パネルの特性であり、固定画面で長時間使用することをできるだけ避けることをお勧めします。</li><li>長時間同じ画像を表示する場合は、コンピュータのスクリーンセーバーまたはパワーセーブ機能を使用してください。</li></ul>
4. 画面上に干渉縞が見られる/パネルを押した跡が消えない	<ul style="list-style-type: none"><li>画面全体に白い画像または黒い画像を表示してみてください。症状が解消されることがあります。</li></ul>

## 6-3. その他の症状

症状	原因と対処方法
1. 調整メニューが表示できない	<ul style="list-style-type: none"><li>操作ボタンのロックが機能していないか確認してみてください（「3-7. 操作ボタンをロックする」(P.16) 参照）。</li></ul>
2. モードメニューが表示できない	<ul style="list-style-type: none"><li>操作ボタンのロックが機能していないか確認してみてください（「3-7. 操作ボタンをロックする」(P.16) 参照）。</li></ul>
3. (人感センサー使用時) 離席しても画面が消えない/モニターに近づいても画面が表示されない	<ul style="list-style-type: none"><li>モニターの設置環境を確認してください。次の環境では正しく動作しないことがあります。<ul style="list-style-type: none"><li>- センサーの正面に、光を反射するもの（鏡やガラス面など）がありませんか。</li><li>- 直射日光が当たる場所にモニターを設置していませんか。</li><li>- モニターの周辺に赤外線を出す機器がありませんか。</li><li>- センサーの前に障害物がありませんか。</li></ul></li><li>センサーに汚れが付いていませんか。汚れがある場合は、柔らかい布で取り除いてください。</li><li>モニターの正面に座っていますか。センサーから垂直に出た赤外線によって人を検知します。</li></ul>
4. USBケーブルで接続したモニターが認識されない/モニターに接続しているUSB周辺機器が動作しない	<ul style="list-style-type: none"><li>USBケーブルは正しく接続されていますか（「7-3. USB (Universal Serial Bus) の活用について」(P.28) 参照）。</li><li>別のUSBポートに差し替えてみてください。別のポートで正しく動作した場合は、EIZOサポートにご相談ください（詳細はコンピュータの取扱説明書を参照してください）。</li><li>コンピュータを再起動してみてください。</li><li>直接コンピュータと周辺機器を接続してみて、周辺機器が正しく動作した場合は、お買い求めの販売店またはEIZOサポートにご相談ください。</li><li>ご使用のコンピュータおよびOSがUSBに対応しているかご確認ください（各機器のUSB対応については各メーカーにお問い合わせください）。</li><li>Windowsをご使用の場合、コンピュータに搭載されているBIOSのUSBに関する設定をご確認ください（詳細はコンピュータの取扱説明書を参照してください）。</li></ul>



症状	原因と対処方法
5. SelfCalibration/階調チェックに失敗する	<ul style="list-style-type: none"> <li>エラーコード表を参照してください。</li> <li>エラーコード表にないコードが表示された場合は、販売点またはEIZOサポートにご相談ください。</li> </ul>

## ● エラーコード表

エラーコード	詳細
0***	<ul style="list-style-type: none"> <li>SelfCalibration時に発生したエラー</li> </ul>
1***	<ul style="list-style-type: none"> <li>階調チェック時に発生したエラー</li> </ul>
*1**	<ul style="list-style-type: none"> <li>DICOMで発生したエラー</li> </ul>
*2**	<ul style="list-style-type: none"> <li>Customで発生したエラー</li> </ul>
*3**	<ul style="list-style-type: none"> <li>CALで発生したエラー</li> </ul>
**10	<ul style="list-style-type: none"> <li>製品の最大輝度が目標輝度よりも低くなっている可能性があります。</li> <li>目標輝度を下げてください。</li> </ul>
**11	<ul style="list-style-type: none"> <li>製品の最小輝度が目標最小輝度よりも高くなっている可能性があります。</li> <li>目標最小輝度を上げてみてください</li> </ul>
**34	<ul style="list-style-type: none"> <li>センサーが正しく動作しなかった可能性があります。</li> <li>主電源を切り、数分後に再度電源を入れてからSelfCalibration/階調チェックをやり直してみてください。</li> </ul>
**94	<ul style="list-style-type: none"> <li>次の設定になっているため、SelfCalibration/階調チェックが実行できない。 <ul style="list-style-type: none"> <li>調整メニューの「設置方向」で「縦置き(SW)」または「横置き」が選択されており、水平解像度が2336ドット未満の場合</li> <li>「設置方向」で「縦置き(HW)」が選択されており、垂直解像度が2336ドット未満の場合</li> </ul> </li> </ul>
**95	<ul style="list-style-type: none"> <li>SelfCalibration/階調チェックの実行条件が正しくない可能性があります。</li> <li>実行条件を確認し、設定し直してください。</li> </ul>



## 第7章 ご参考に

### 7-1. オプションアーム取付方法

この製品はスタンド部分を取り外すことによって、オプションアーム（またはオプションスタンド）に取り付けることが可能になります。対応しているオプションアーム（またはオプションスタンド）については、当社のWebサイトを参照してください。 <http://www.eizo.co.jp>

#### 注意点

- 取り付けの際は、アームまたはスタンドの取扱説明書の指示に従ってください。
- 他社製のアームまたはスタンドを使用する場合は、次の点をアームまたはスタンドメーカーにご確認の上、VESA規格準拠のものを選択してください。
  - 取付部のネジ穴間隔：100 mm×100 mm
  - プレート部の厚み：2.6 mm
  - 許容質量：モニター本体の質量（スタンドなし）とケーブルなどの装着物の総質量に耐えられること
- 取り付けには次のねじをご使用ください。
  - 本体部分とスタンドを固定しているねじ
- アームまたはスタンドを使用する場合は、次の範囲（チルト角）で使用してください。
  - 上45°下45°（横表示時、および時計回り90°に縦表示時）
- ケーブル類は、アームまたはスタンドを取り付けた後に接続してください。
- 取り外したスタンドを昇降させないでください。モニター本体を取り付けていない状態でスタンドを昇降させると、けがや故障の原因となります。
- モニターおよびアームまたはスタンドは重量があります。落としたりするとけがや故障の原因になります。

#### 取付方法


**1. パネル面が傷つかないように、安定した場所に柔らかい布などを敷いた上に、パネル面を下に向けて置きます。**

**2. スタンド部分を取り外します。**

別途ドライバを準備ください。ドライバを使って、本体部分とスタンドを固定しているねじ4箇所を取り外します。

**3. モニターにアーム（またはスタンド）を取り付けます。**


アームまたはスタンドの取扱説明書で指定のねじを使って取り付けます。

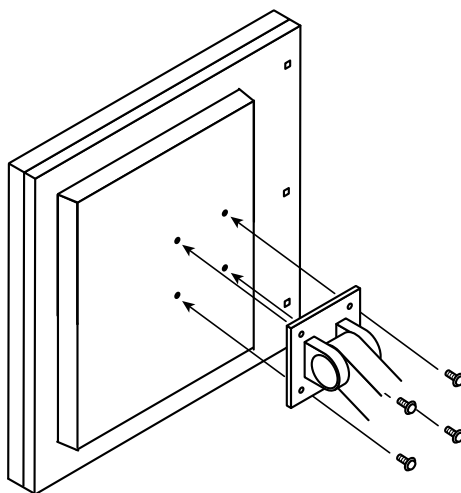

## 7-2. 複数のコンピュータを接続する

この製品は、複数のコンピュータを接続し、切り替えて表示することができます。

### 接続例

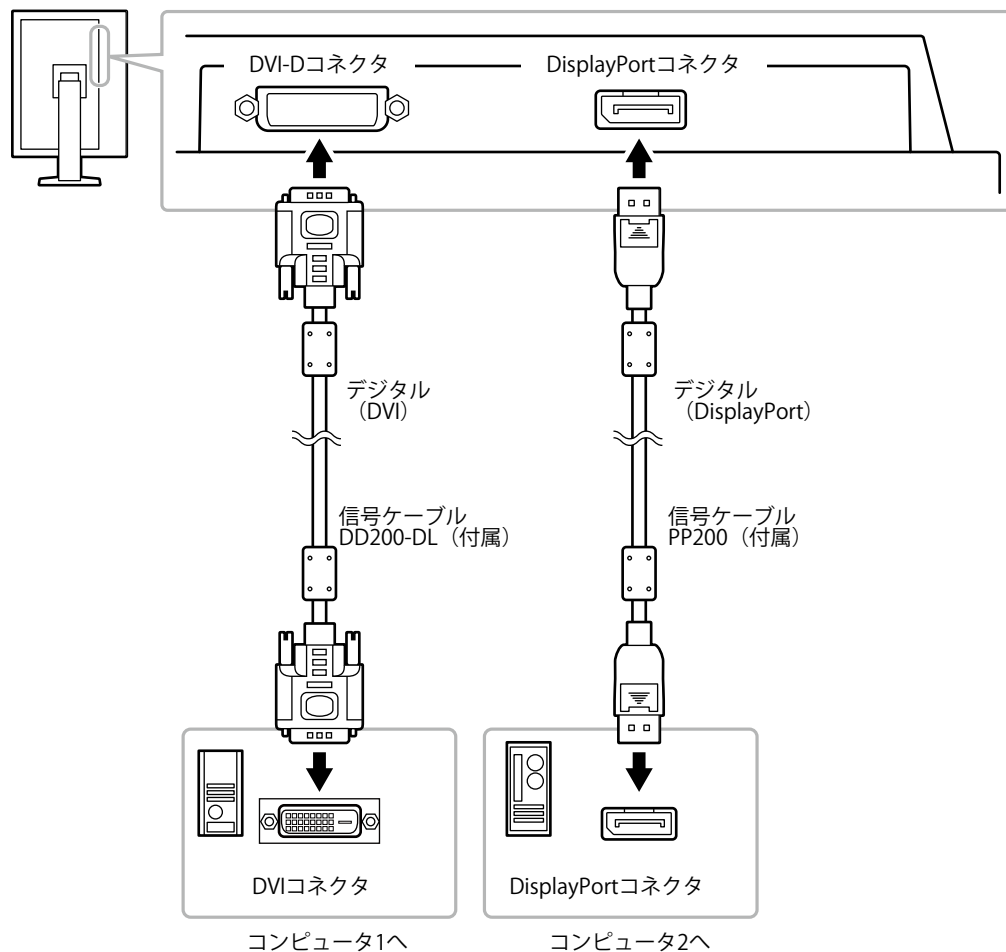


### ● 入力信号を切り替える

#### 設定方法

1. 調整メニューの「ツール」を選択し、ENTERを押します。
2. 「ツール」で「入力」を選択し、ENTERを押します。
3. ▲または▼で「DVI」または「DisplayPort」を選択します。
4. 設定が完了したらENTERを押します。

画面右上に選択された入力ポート名が表示されます。

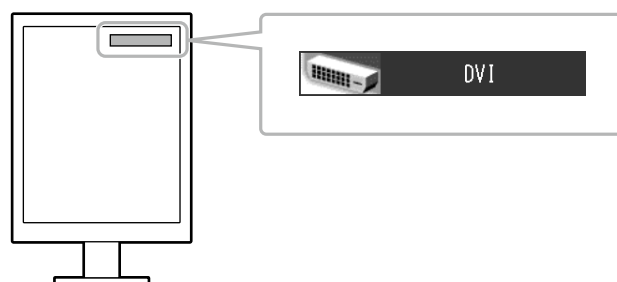

## ● 入力信号の切替方法を設定する

設定	機能
オート	コンピュータ信号が入力されているコネクタを自動的に判別して画面を表示します。コンピュータの電源が切れたり、省電力モードに入ると自動的に、他の信号を表示します。
マニュアル	表示中のコンピュータの信号のみを検知します。「入力」で表示させたい入力信号を選択してください。

### 設定方法

1. 調整メニューの「ツール」を選択し、ENTERを押します。
2. 「ツール」で「入力切替」を選択し、ENTERを押します。
3. ▲または▼で「オート」または「マニュアル」を選択します。
4. 設定が完了したら ENTER を押します。

### 参考

- 「オート」が選択されている場合は、すべてのコンピュータが省電力モードに入っている場合のみモニターの省電力機能が動作します。

## 7 - 3. USB（Universal Serial Bus）の活用について

この製品はUSB規格に対応しているハブを搭載しています。USB対応のコンピュータまたは他のUSBハブに接続することにより、この製品がUSBハブとして機能し、USBに対応している周辺機器と接続できます。

### ● 必要なシステム環境


1. USBポートを搭載したコンピュータ、あるいはUSB対応のコンピュータに接続している他のUSBハブ
2. Windows 2000/XP/Vista/7/8またはMac OS 9.2.2およびMac OS X 10.2以降
3. EIZO USBケーブル（MD-C93）

#### ■ 注意点

- 使用するコンピュータ、OSおよび周辺機器によっては動作しない場合があります。各機器のUSB対応については各メーカーにお問い合わせください。
- モニターが省電力モードの場合、またはモニターの電源ボタンのみで電源が切れている場合、USBアップストリームポートおよびUSBダウンストリームポートに接続されている機器が動作します。そのためモニターの消費電力は、省電力モードであっても接続される機器によって変化します。
- 主電源スイッチオフ時、USBポートに接続されている機器は動作しません。

### ● 接続方法（USB機能のセットアップ方法）

1. はじめにコンピュータとモニターを信号ケーブルで接続し、コンピュータを起動しておきます。
2. USB対応のコンピュータ（あるいは他のUSBハブ）のUSBダウンストリームポートとモニターのUSBアップストリームポートをUSBケーブルで接続します。  
USBケーブルの接続により自動的にUSBのハブ機能がセットアップされます。
3. USB対応の周辺機器をモニターのUSBダウンストリームポートに接続します。

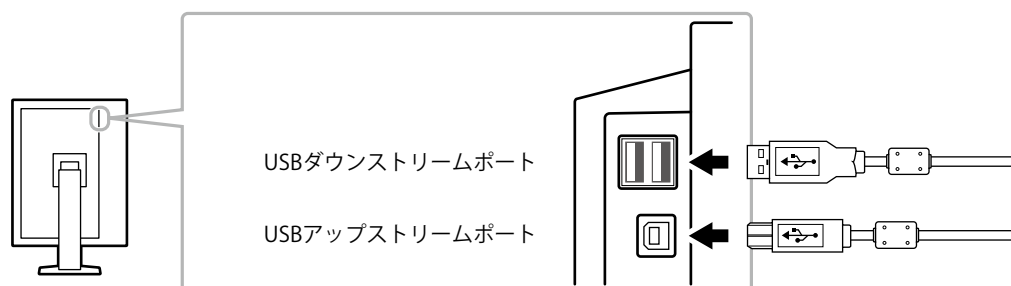

## 7-4. モニター情報を表示する

### ● 信号情報を表示する

現在表示している入力信号の情報を表示します。

#### 設定方法

1. 調整メニューの「ツール」を選択し、ENTERを押します。
2. 「ツール」で「入力信号情報」を選択し、ENTERを押します。  
「入力信号情報」が表示されます。  
(例)




### ● モニター情報を表示する

この製品に関する情報を表示します。

#### 設定方法

1. 調整メニューの「ツール」を選択し、ENTERを押します。
2. 「ツール」で「モニター情報」を選択し、ENTERを押します。  
「モニター情報」が表示されます。  
製品名、製造番号、ファームウェアバージョン、使用時間などを表示します。

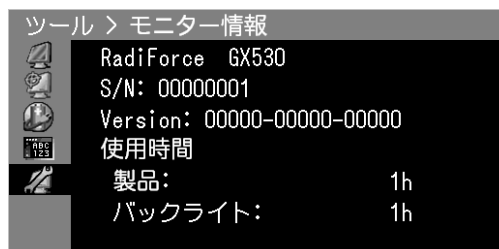

#### 注意点

- ・工場での検査などのため、購入時に使用時間が「0」ではない場合があります。

## 7-5. 仕様

液晶パネル	サイズ	54.0 cm (21.3) 型 モノクロTFT
	表面処理	GX530-BL/CL: アンチグレア GX530-CLAR: アンチリフレクション
	表面硬度	2H
	視野角	左右170°、上下170° (CR≥50)
	ドットピッチ	0.165 mm
	応答速度	黒→白→黒: 約25 ms
水平走査周波数		31~135 kHz
垂直走査周波数		24~61 Hz (ノンインターレース) (VGA TEXT時: 69~71 Hz、QSXGA (2048×2560) 時: 24~51 Hz)
解像度		5Mピクセル (縦型設置時2048×2560ドット (水平×垂直)) 15Mサブピクセル (縦型設置時2048×7680ドット (水平×垂直) (「Sub Pixel Drive」: 「オン」設定時))
ドットクロック (最大)		290 MHz
表示階調		16,369階調中1,024階調同時表示 (10bit信号入力時、「Sub Pixel Drive」: 「オフ」設定時) 4,093階調中1,024階調同時表示 (10bit信号入力時、「Sub Pixel Drive」: 「オン」設定時)
推奨輝度		500 cd/m <sup>2</sup>
表示サイズ (水平×垂直)		337.9 mm×422.4 mm
電源		AC100V±10%、50/60 Hz、1.3A
消費電力	画面表示時	130 W以下
	省電力モード時	2.5 W以下 (DVI 1系統入力時、USB機器非接続時、 「入力切替」: 「マニュアル」設定時、「DC5V Output」: 「オフ」時)
	電源オフ時	2.0 W以下 (USB機器非接続時)
	主電源オフ時	0 W
信号入力コネクタ		DVI-Dコネクタ DisplayPortコネクタ (Standard V1.1a準拠、HDCP対応)
デジタル信号 (DVI) 伝送方式		TMDS (Single Link/Dual Link)
プラグ&プレイ機能		デジタル信号 (DVI-D) 入力時: VESA DDC 2B/EDID structure 1.3 デジタル信号 (DisplayPort) 入力時: VESA DisplayPort/EDID structure 1.4
寸法 (幅) × (高さ) × (奥行き)	本体	388 mm×512~595 mm×245.5 mm
	本体 (スタンドなし)	388 mm×496 mm×99 mm
質量	本体	約10.5 kg
	本体 (スタンドなし)	約7.8 kg
可動範囲	FlexStand2	チルト角度: 上30°下0°
		スウィーベル角度: 右172°左172°
		昇降: 174 mm (チルト角度30°時)、 83 mm (チルト角度0°時)
		ローテーション: 90° (縦表示時反時計回り)
環境条件	温度	動作温度範囲: 0°C~35°C
		輸送および保存温度範囲: -20°C~60°C
	湿度	動作湿度範囲: 20%~80% R.H. (非結露状態)
		輸送および保存湿度範囲: 10%~90% R.H. (非結露状態)
	気圧	動作気圧範囲: 700 hPa~1060 hPa
		輸送および保存気圧範囲: 200 hPa~1060 hPa

USB	規格	USB Specification Revision 2.0準拠
	ポート	アップストリーム×1、ダウンストリーム×2
	通信速度	480 Mbps（ハイスピード）、12 Mbps（フルスピード）、1.5 Mbps（ロースピード）
	供給電源	ダウンストリーム：最大500mA/1ポート

## 主な初期設定値

**CAL Switchモード：工場出荷時の表示設定はDICOMモードです。**

モード	輝度	ガンマ値
DICOM	500cd/m <sup>2</sup>	DICOM
Custom	約400 cd/m <sup>2</sup>	DICOM
CAL	300 cd/m <sup>2</sup>	DICOM


## その他

CAL Switchモード	1-DICOM
入力※	DVI
人感センサー	オフ
パワーセーブ	高
入力切替	オート
起動ロゴ※	オフ
DDC※	オン
DC5V Output※	オフ
設置方向※	縦置き(HW)
信号フォーマット※	Standard
メニューポジション	中央
言語選択	日本語

※「オールリセット」（P.17参照）を実行しても初期設定値には戻りません。

## 外観寸法

単位：mm（インチ）

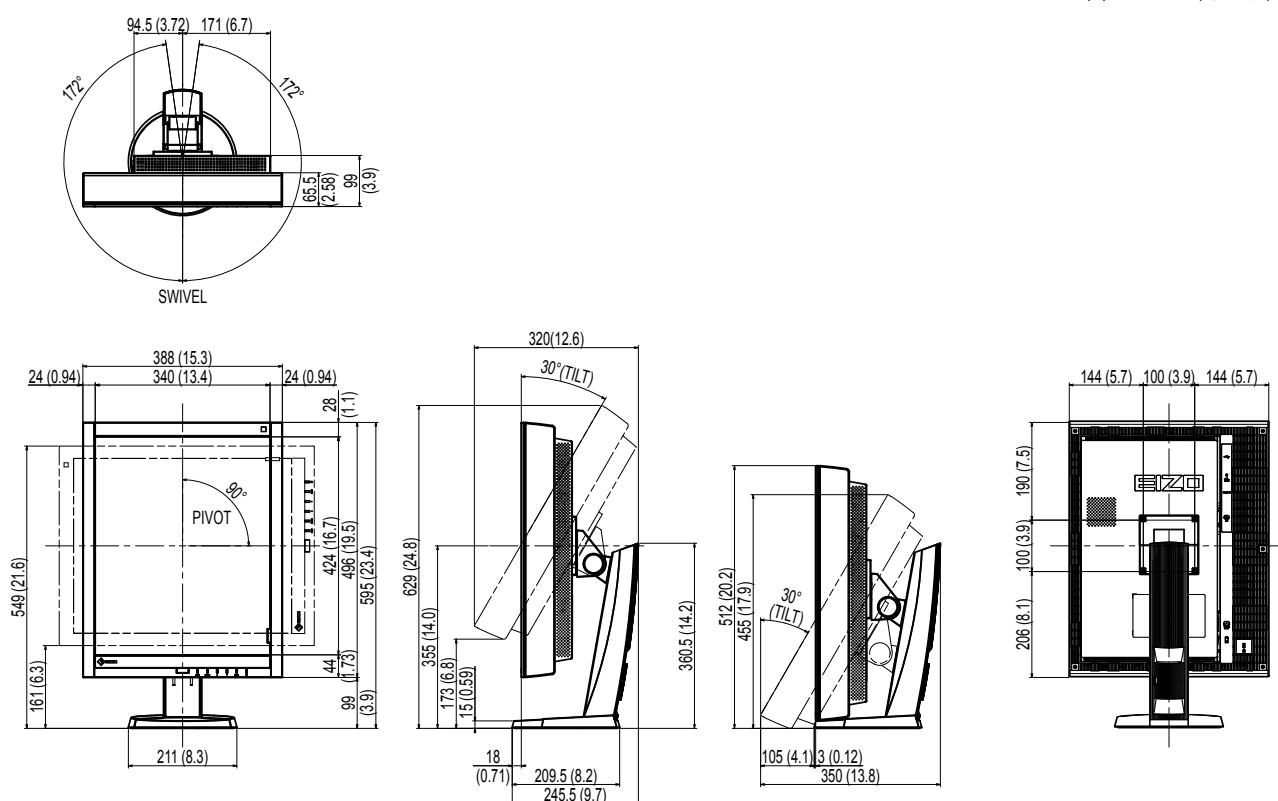

## オプション品

キャリブレーションキット	EIZO「RadiCS UX1」Ver.3.6.1以降 EIZO「RadiCS Version Up Kit」Ver.3.6.1以降
ネットワークQC管理ソフトウェア	EIZO「RadiNET Pro」Ver.3.6.1以降 EIZO「RadiNET Pro Lite」Ver.3.6.1以降

オプション品に関する最新情報および最新の対応グラフィックスボード情報は、当社のWebサイトを参照してください。

<http://www.eizo.co.jp>



## 7 - 6. 用語集

### 解像度

液晶パネルは決められた大きさの画素を敷き詰めて、その画素を光らせて画像を表示させています。この機種の場合は横2048個、縦2560個の画素がそれぞれ敷き詰められています。このため、2048×2560（縦型設置時）、2560×2048（横型設置時）の解像度であれば、画像は画面全体（1対1）に表示されます。

### DDC（Display Data Channel）

VESAによって標準化された、コンピュータとモニター間で設定情報などを双方向にやりとりするための国際規格です。

### DICOM（Digital Imaging and Communication in Medicine）

米国放射線学会（American College of Radiology）と北米電子機器工業会（National Electric Manufacturers Association）が開発した医用画像と通信の標準規格です。

DICOMに準拠した機器を相互接続することにより、画像検査情報や画像データの伝送が可能になります。DICOM Part 14はDICOM規格の中でデジタル医用画像の視覚的解釈を統一し、グレースケールイメージの表示について規格化したものです。

### DisplayPort

パソコンや音響、映像機器などをモニターに接続する次世代デジタルAVインターフェースです。1本のケーブルで映像とともに音声も伝送できます。

### DVI（Digital Visual Interface）

デジタルインターフェース規格の一つです。コンピュータ内部のデジタルデータを損失なくダイレクトに伝送できます。

伝送方式にTMDS、コネクタにDVIコネクタを採用しています。デジタル信号入力のみ対応のDVI-Dコネクタと、デジタル/アナログ信号入力可能なDVI-Iコネクタがあります。

### DVI DMPM（DVI Digital Monitor Power Management）

デジタルインターフェースの省電力機能のことです。モニターのパワー状態についてはモニターオン（オペレーションモード）とアクティブオフ（省電力モード）が必須となっています。

### HDCP（High-bandwidth Digital Content Protection）

映像や音楽などのデジタルコンテンツの保護を目的に開発された、信号の暗号化方式。

DVIコネクタやHDMIコネクタなどを経由して送信されるデジタルコンテンツを出力側で暗号化し入力側で復号化することによりコンテンツを安全に伝送できます。

出力側と入力側の双方の機器がHDCP対応していないと、コンテンツを再生できない仕組みになっています。

### TMDS（Transition Minimized Differential Signaling）

デジタルインターフェースにおける、信号伝送方式の一つです。

# 付録

## 商標

VESAはVideo Electronics Standards Associationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Windows、Windows Vista、Windows Media、Xbox 360は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

Apple、Mac、Macintosh、iMac、eMac、Mac OS、MacBook、PowerBook、ColorSync、QuickTime、iBookはApple Inc.の登録商標です。

Adobe、Adobe AIR、Acrobat、PhotoshopはAdobe Systems Incorporated（アドビ システムズ社）の米国およびその他の国における登録商標です。

PowerPCはInternational Business Machines Corporationの登録商標です。

PentiumはIntel Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

AMD Athlon、AMD OpteronはAdvanced Micro Devices, Inc.の商標です。

GRACoL、IDEAllianceはInternational Digital Enterprise Allianceの登録商標です。

ColorVision、ColorVision Spyder2はDataColor Holding AGの米国における登録商標です。

Spyder3はDataColor Holding AGの商標です。

Eye-One、ColorMunki、X-RiteはX-Rite Incorporatedの米国および/またはその他の国における登録商標または商標です。

TouchWareは3M Touch Systems, Inc.の商標です。

NextWindowはNextWindow Ltd.の商標です。

RealPlayerはRealNetworks, Inc.の登録商標です。

NECは日本電気株式会社の登録商標です。PC-9801、PC-9821は日本電気株式会社の商標です。

プレイステーション、PlayStation、PSP、PS3は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。

Japan Color、ジャパンカラーは社団法人日本印刷産業機械工業会および社団法人日本印刷学会の日本登録商標です。

JMPAカラーは社団法人日本雑誌協会の日本登録商標です。

EIZO、EIZOロゴ、ColorEdge、DuraVision、FlexScan、FORIS、RadiForce、RadiCS、RadiNET、Raptor、ScreenManagerはEIZO株式会社の日本およびその他の国における登録商標です。

C@T-one、FlexViewはEIZO株式会社の日本登録商標です。

ColorNavigator、EIZO EasyPIX、EcoView NET、EIZO ScreenSlicer、i・Sound、Screen Administrator、UniColor ProはEIZO株式会社の商標です。

その他の各会社名、各製品名は各社の商標または登録商標です。

## ライセンス

この製品上で表示される文字には、株式会社リコーが制作したビットマップフォント丸ゴシックボールドを使用しています。

## VCCI

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

また、製品の付属品（ケーブル含む）や当社が指定するオプション品を使用しない場合、VCCIの技術基準に適合できない恐れがあります。

VCCI-B

## 医療規格

この製品を用いる装置を設計、使用する場合は、IEC60601-1-1の規格要求に従ってください。

## その他規格

この装置は、社団法人 電子情報技術産業協会の定めたパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策規格を満足しております。しかし、規格の基準を上回る瞬時電圧低下に対しては、不都合が生じることがあります。

この装置は、高調波電流を抑制する日本工業規格JIS C 61000-3-2に適合しております。

关于电子信息产品污染控制标识



本标识根据「电子信息产品污染控制管理办法」，适用于在中华人民共和国销售的电子信息产品。标识中央的数字为环保使用期限的年数。只要您遵守该产品相关的安全及使用注意事项，在自制造日起算的年限内，不会产生对环境污染或人体及财产的影响。上述标识粘贴在机器背面。

• 有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板	×	○	○	○	○	○
机箱	○	○	○	○	○	○
液晶显示器	×	×	○	○	○	○
其他	×	○	○	○	○	○
○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求以下。 ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求。 (企业可在此处，根据实际情况对上表中打“×”的技术原因进行进一步说明)						

## 製品回収、リサイクルシステムについて

パソコン及びパソコン用モニターは「資源有効利用促進法」の指定再資源化製品に指定されており、メーカーは自主回収及び再資源化に取り組むことが求められています。

当社製品は、業界団体「パソコン3R推進協会」が回収させていただきます。

回収を希望されるお客様は当社のWebサイトよりお申し込みください。

(<http://www.eizo.co.jp>)

※ 本製品は業務用途を意図した製品ですので、ご使用後廃棄される場合は有償となります。

